

Heydent JW Power NEXT

dantų balinimo gelis

Jei šiame paciento informaciniame lapelyje yra kokių nors neaiškumų, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą prieš jį naudodami.

Naudojimo nurodymai

JW Power NEXT balinimo gelis skirtas naudoti tik odontologo kabinete. Jo sudėtyje yra balinimo gelis ir aktyvatorius santykiu 4:1 dvigubame savaiame susimaišančiame švirkšte, kuriame yra 5 g aktyvios medžiagos. Sudėtyje yra 35% vandenilio peroksido.

Indikacijos

- Negyvo danties balinimas
- Pakeitusio spalvą danties balinimas, kaip alternatyva karūnėlei ar laminatui
- Medikamentų (pvz., tetraciklino) sukkelto dantų patamsėjimo gydymas

Kontraindikacijos

- Atviras dentinas
- Ištrupėję plombų kraštai
- Labai jautrus pacientas
- Jautrumas bet kuriai gelio sudedamajai medžiagai
- Nėštumas ir maitinimas krūtimi (dėl nepakankamų saugumo duomenų su nėščiomis ir maitinančiomis krūtimi moterimis. Pacientai gali jausti nedidelį dantų jautrumą balinimo metu ar iš karto po jo, tačiau paprastai jautrumas per trumpą laiką praeina.

Nedelsdami nutraukite balinimą, jei pacientas jaučia pernelyg didelį skausmą.

Pasiruošimas

Nustatykite esamą dantų spalvą, naudodami Vita[®] Shade spalvų skalę. Vita[®] Shade skalę galima išdėstyti pagal atspalvį:

A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

arba pagal šviesumą:

B1 A1 B2 D2 A2 C1 C2 D3 A3 D4 B3 A3,5 B4 C3 A4 C4.

Nuvalykite paciento dantis oro srove arba valymo pasta. Naudokite skruostų/lūpų retraktorių ar panašų instrumentą. Apsaugokite danteną su dantenų apsauga. Nenaudokite dantų nuskausminimo.

Aktyvatorius (raudonas komponentas) yra kaustikas (natrio hidroksidas). Sumaišytas balinimo gelis sudirgina akis ir gleivinę. Mūvėkite pirštines ir užsidėkite apsauginius akinius, kai naudojate gelį. Venkite kontakto su akimis, oda ir gleivine.

Naudojimas

Nusisukę nuo paciento nuimkite švirkšto dangtelį ir uždėkite maišymo antgalį. Išspauskite gelį iš švirkšto, kol iš antgalio pasirodys vienodos spalvos gelis. Nevienodos spalvos gelį tinkamai išmeskite. Ilgą laiką švirkštą laikant aukštoje temperatūroje, sumaišytame gelyje gali atsirasti burbuliukų. Dėl netinkamo laikymo sumaišytas gelis gali gautis nehomogeniškas ar pernelyg skystas, ypač paskutiniame švirkšto ketvirtadalyje. Jei taip atsitiko, tokio gelio nenaudokite. Gelį ant balinamų dantų paviršiaus reikia užtepti 1-2 mm storio sluoksniu. Gelį patogiu tolygiai paskirstyti maišymo antgalio galu.

JW Power Bleaching Next galima naudoti be jokio šviesos šaltinio, tačiau geresni rezultatai gaunami aktyvuojant jį lempa, o geriausi – aktyvuojant diodiniu lazeriu.

Bendra rekomendacija, naudojant šviesos šaltinį: aktyvuokite balinamą pavienį dantį arba visą kvadrantą 30 sekundžių. Ir specialistas, ir pacientas turi dėvėti apsauginius akinius.

Vadovaukitės lempos ar lazerio gamintojo rekomendacijomis. Neperkaitinkite balinamų dantų. Po aktyvacijos palaukę apie 10 minučių, nusiurbkite gelį ir įvertinkite balinimo rezultatą. Jei reikalinga, geresniam poveikiui pasiekti procedūrą galima kartoti dar du kartus. Prieš užtepant gelį įsitinkinkite, kad dantenos tinkamai apsaugotos. Po balinimo pakartotinai nustatykite dantų spalvą. Jei švirkšte liko balinimo medžiagos kitai procedūrai, nuimkite maišymo antgalį ir užsukite švirkšto dangtelį. Laikykite balinimo priemonę šaldytuve. Kitam balinimui naudokite naują maišymo antgalį.

Pastaba: Dantų plombos ir karūnėlės iš keramikos ar metalo balinant spalvos nekeičia. Todėl visi užpildai turi būti pakeisti po dviejų savaitių po balinimo procedūros.

Negyvo danties balinimas

Papildomas gelis yra įdedamas į danties šaknies kanalą. Tam reikia pašalinti plombą ir šaknies kanalo užpildą 2 mm žemiau cemento-emalio jungties. Viskas uždengiama stiklo jonomeriniu cementu ir toliau balinama, kaip aprašyta aukščiau.

Užbaigimas

Po paskutinės balinimo procedūros nusiurbkite gelį, nuimkite dantenu apsaugą ir gerai išplaukite vandeniu. Nusausinkite dantų paviršių ir nupoliruokite poliravimo pasta. Esant reikalui, galima atlikti dantų remineralizaciją, naudojant fluorido tirpalą arba gelį. Remineralizacija rekomenduojama, jei pacientui yra didelis dantų jautrumas po procedūros. Pacientas negali valgyti, gerti ir rūkyti 1 valandą po balinimo. Rekomenduojama vengti stipriai dažančių produktų (raudono vyno, kavos ir pan.) ir rūgštaus maisto kelias dienas po dantų balinimo.

Saugojimo laikas ir sąlygos

Nenaudokite JW Power Bleaching Gel NEXT, pasibaigus jo galiojimo laikui, nes tada neįtikrinamas patikimas balinamasis poveikis.

Laikykite gelį šaldytuve 3 - 9°C temperatūroje. Neužšaldykite.

Produkto sudėtyje yra vandenilio peroksido, kalio nitrato, natrio fluorido, natrio hidroksido, glikolio derivatų, konsistenciją ir spalvą veikiančių medžiagų.

Nesklandumai ir jų sprendimo būdai

Nepakankamas balinamasis poveikis	Pakartokite balinimo procedūrą
Pacientas jaučia skausmą	Gelis pateko ant atviro dentino arba po atšokusia plomba (turi būti uždengiama prieš balinimą). Pacientas ypatingai jautrus (priklauso nuo individualios dantų struktūros)
Po balinimo matomos baltos dėmės ant emalio	Lokali danties demineralizacija ar dehidratacija. Atsistato. Išnyksta padengus fluoro junginiu
Po balinimo pabalusi gleivinė (po kiek laiko atsistato)	Dantenos blogai apsaugotos arba apsauga nukrito
Iš antgalio išspaustas gelis yra nehomogeniškas (bespalvis ar raudonas)	Gelyje atsirado burbuliukų dėl netinkamo laikymo per aukštoje temperatūroje arba per ilgai
Po balinimo sumažėjusi kompozito-emalio adhezija	Peroksido likučiai. Pakeisti kompozitą po 1-2 savaitių



Platintojas Lietuvoje:

UAB Baltic Medservice

Laisvės pr. 125, 06118 Vilnius

marketing@balticmedservice.lt

(+370) 698 88923; (+370) 616 7003

Baltic Medservice